



Confiança em cada
procedimento, desde
o primeiro olhar

Videolaringoscópio

Intubação perfeita na primeira tentativa

SMARTSCOPE VL PRO

AMPLIA VISUALIZACIÓN

Tela sensível ao toque antirreflexo de 3,5", visualização de imagens em campo panorâmico.


USB TIPO C

Para uma rápida transferência de dados e carregamento da bateria.

BOTÃO LIGA/DESLIGA

ROTAÇÃO INTELIGENTE

Para cima-para baixo → 120°
Esquerda-direita → 270°

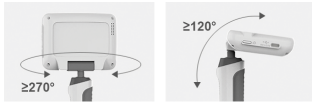

INDICADOR LUMINOSO

ASA ERGONÔMICA

Para melhor pegada e ajuste.

CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO

Excelente visão com sistema antivapor ativo aquecido.

LUZ FRIA DE ALTA POTÊNCIA



Eficiência e Clareza na Visualização da Laringe

Projetado para oferecer uma visualização confiável, simples e conveniente da laringe, facilita uma visão clara das vias aéreas superiores, reduzindo a necessidade de manipulação dos tecidos.

A melhoria na visualização da epiglote oferece múltiplos benefícios:

- Menor tempo para a intubação bem-sucedida
- Maior taxa de sucesso na primeira tentativa de intubação
- Redução da força aplicada
- Redução das complicações relacionadas à intubação
- Reducción de las complicaciones relacionadas con la intubación
- Menor exposição dos médicos a patógenos provenientes das gotículas



Características:



720P HD

Câmera de 2,0 megapixels que proporciona fotografias e vídeos 1280x720.



Vídeo/Câmera

Vídeo e foto com um único clique.



Rotação Multiângulo

Ângulo de rotação frontal-traseiro 120° e esquerda-direita 270°.



Tela Tátil

Tela totalmente sensível ao toque antirreflexo de 3,5 polegadas com resolução de 640x480.

Potência

- Compatível com carregadores sem fio
- Economia automática de bateria

Memória Inteligente

- 16GB de memória padrão
- Opcional: 32-256GB

Áreas de Uso:


- Anestesia
- Pediatria
- UTI
- Ambulâncias
- Urgências/Salas de Emergência
- Medicina Respiratória



Dois equipamentos, cada um com seu sistema exclusivo de lâminas. Uma escolha de acordo com as necessidades clínicas.

Lâminas Reutilizáveis

Ideais para instituições que priorizam a sustentabilidade e dispõem de processos próprios de esterilização, como centros cirúrgicos. Disponíveis em diferentes tipos e tamanhos, as lâminas reutilizáveis permitem uma cobertura anatômica completa, desde neonatos até adultos, incluindo pacientes com via aérea difícil.

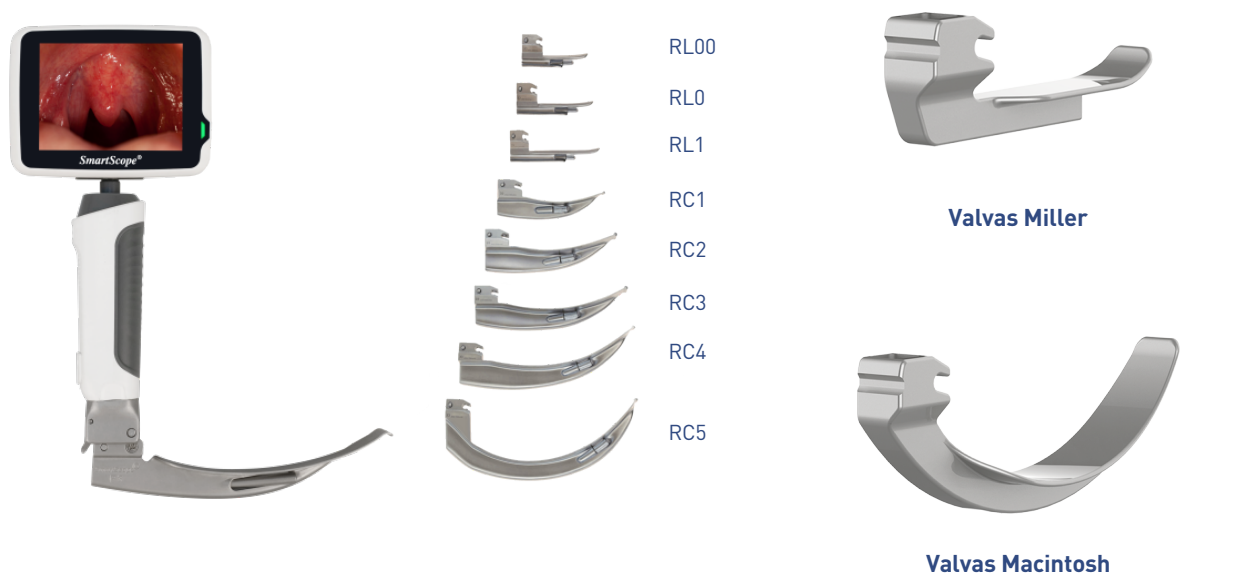

CÓDIGO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
RL00	Miller	Extra pequeno (prematureo)	Lâmina reta
RL0	Miller	Pequeno (neonato)	Lâmina reta
RL1	Miller	Padrão (neonato)	Lâmina reta
RC1	Macintosh	Pediátrico	Lâmina curva
RC2	Macintosh	Pequeno (adulto)	Lâmina curva
RC3	Macintosh	Médio (adulto)	Lâmina curva
RC4	Macintosh	Grande (adulto)	Lâmina curva
RC5	Hiperangulada	Extra grande (adultos, anatomias difíceis)	Lâmina curva hiperangulada

Lâminas Descartáveis

Voltadas para quem busca maior agilidade operacional, menor manipulação e eficiência na rotação de pacientes, como em salas de emergência.



S1 Neonato



S2 Pediátrico



S3 Adulto
S4 Adulto Grande

CÓDIGO	TIPO	TAMANHO (Ø intubação aplicável)	USO RECOMENDADO
S1	Macintosh	Extra pequeno (2,5 – 4,0 mm)	Prematuros e neonatos
S2	Macintosh	Pequeno (4,0 – 6,0 mm)	Pediátricos e crianças
S3	Macintosh	Médio (6,0 – 8,0 mm)	Adultos
S4	Macintosh	Grande (≥ 8,0 mm)	Adultos com anatomia ampla

Especificações Técnicas:

O videolaringoscópio Tecme combina alta tecnologia em iluminação, visualização e gravação para melhorar a precisão e a eficiência em procedimentos clínicos.

Tamanho e Peso	- Dimensões: 130 x 100 x 239 mm (Comprimento x Largura x Altura). - Peso (sem lâmina): 0,26 kg.	
Fonte de Luz	LED fria, iluminação ≥1000 lx, temperatura de cor ≥5000 K.	
Tela	- Tipo: LCD TFT colorido de 3,5". - Ângulo de rotação: Frontal-traseiro ≥120°, esquerda-direita ≥270°. - Controle tátil e brilho ajustável em 3 níveis.	
Câmera	- Tipo: CMOS, 1 milhão de pixels. - Resolução espacial: ≥8,00 lp/mm. - Ângulo de visão: ≥60°. - Design antiembaçante com controle de superaquecimento (38–41°C).	
Memória	16GB incluídos - Extensível hasta 256 GB.	
Bateria	- Tipo: Ion de lítio. - Duração de trabalho: 300 minutos. - Ciclo de recarga: 300 vezes. - Economia automática de bateria: desligamento automático após 5 minutos para preservar a vida útil. - Alarme de bateria baixa.	
Distância de Trabalho	20-100 mm.	
Funções Especiais	Fotografias, Gravação de vídeo, Navegação, Reprodução, Configuração de tempo, Registros médicos.	
Porta	USB tipo-C e carregamento sem fio.	
Interface / Saída	Porta de vídeo opcional para tela de 10" ou projetor com HDMI.	
Fonte de Alimentação	AC100–240V, 50/60Hz, potência de 50 VA.	



Mais de 55 anos de experiência comprometidos com a inovação e o cuidado do paciente.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo